

HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen



Schaukelball

Maximallast 150 kg

Damit's sicher ist!

HAIDIG OHG

🏠 Oberste-Wilms-Straße 23 – 44309 Dortmund



☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

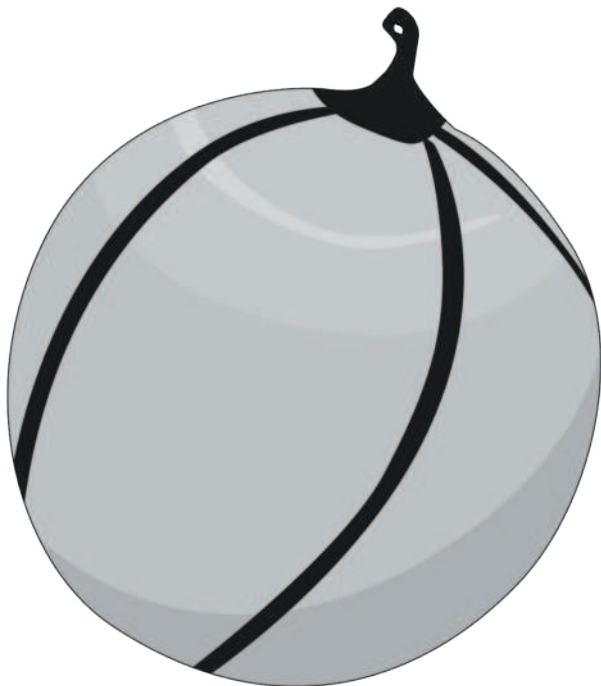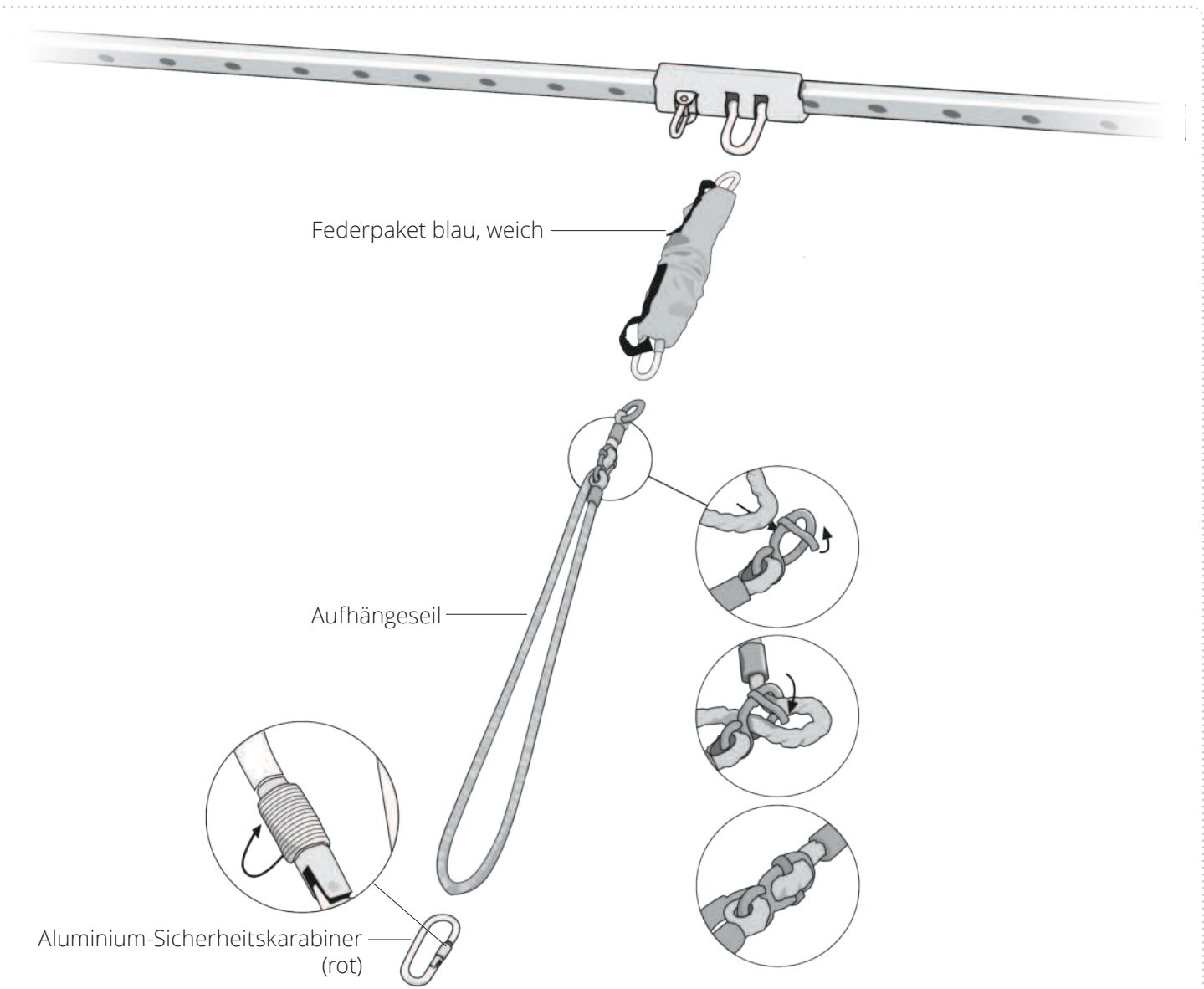

**Sonderzubehör (3-tlg.)
separat erhältlich
Art.-Nr.: 116000-Z**

- 1 Federpaket blau, weich (bis 80 kg)
- 1 Aufhängeseil inkl. Aluminium-Sicherheitskarabiner rot, 100 – 200 cm



Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers! Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

Herstellerinformation

Schaukelball

Hersteller:
HAIDIG® OHG
Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

Artikelnummer: 116000

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

Maximallast	150 kg
Größe	ø ca. 60 cm
Eigengewicht	ca. 3 kg
Material	Cordura, dunkelblau / rot, Polypropylengurtband, Füllung Polyester-Wattefaser Stücke
Zubehör	–

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Der Schaukelball kann an einem Deckenaufhängungssystem an **einem** Punkt aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

Beurteilungskriterien:



- Fördert Muskelaufbau und Körpereinsatz
- Zum Aggressionsabbau einsetzbar
- Drehmöglichkeit fördert Gleichgewichtssinn
- Fördert Körperkoordination

Pflege und Reinigung:

Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!

Anwendungsbeispiele

HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 1-Punkt-Aufhängung

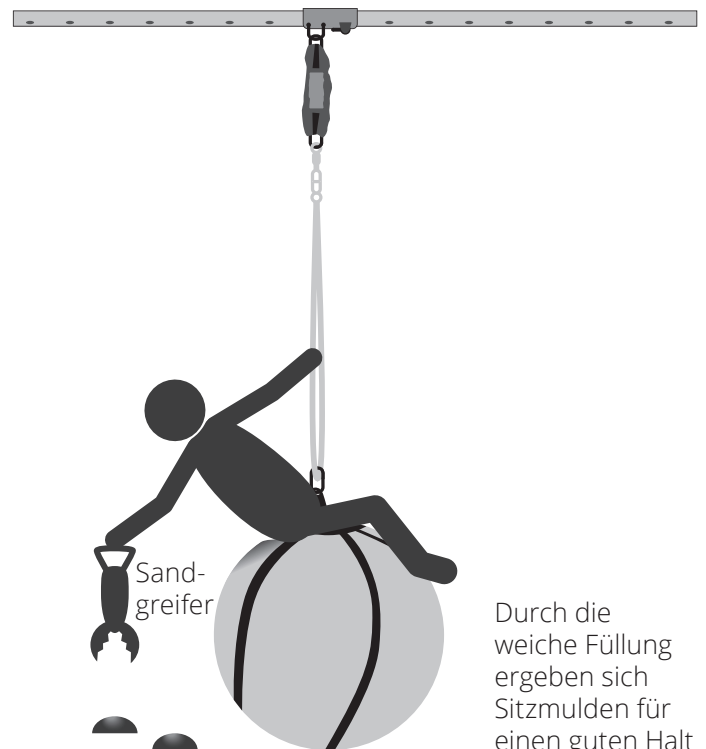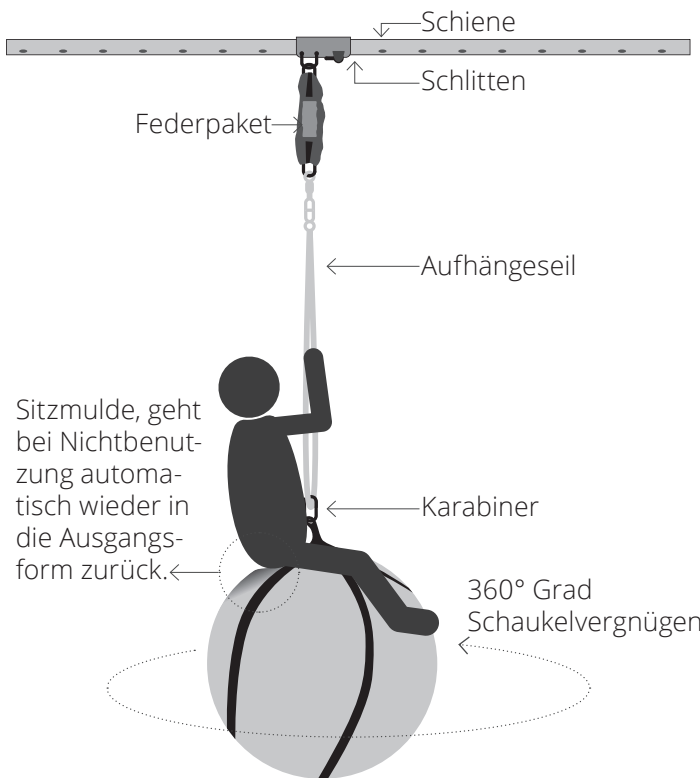

Beim Schaukeln Kirschkernkissen oder Bälle aufsammeln

Durch die weiche Füllung ergeben sich Sitzmulden für einen guten Halt und ein sicheres Gefühl.



Der Schaukelball ist auf dem Boden nutzbar für Gleichgewichtsübungen in Bauchlage.

